

Dit zijn de onderdelen van jouw Pen



Onderdelen van de Pen



Na de eerste injectie met jouw Pen, zullen de volgende injecties veel gemakkelijker zijn. Misschien kan je het zelf doen. Als je een nieuwe naald hebt geplaatst, is het enige wat je moet doen:



- 1** De witte knop indrukken
- 2** De zwarte knop aan het einde van de Pen draaien tot je het juiste getal op het kleine scherm kan zien. Jouw arts of verpleegkundige zal je vertellen welk getal dit moet zijn
- 3** Geef jezelf dan de injectie zoals de verpleegkundige je heeft voorgedaan. Daarna 5 tellen wachten, de Pen verwijderen ... klaar!


- Het volgende moet jouw mama of papa lezen
- Gebruik de NutropinAq™ Pen niet tot uw arts of verpleegkundige u de juiste technieken heeft aangeleerd
 - De NutropinAq™ Pen is uitsluitend bestemd voor gebruik met de NutropinAq™ Pen patroon
 - NutropinAq™ en NutropinAq™ Pen moeten altijd in de koelkast bewaard worden
- NIET IN DE VRIEZER BEWAREN
- U mag uw NutropinAq™ Pen en patroon tot maximaal 45 minuten voor de injectie uit de koelkast halen
 - Was uw handen met water en zeep vóór u de NutropinAq™ Pen gebruikt
 - Gebruik voor iedere injectie een nieuwe naald
 - De patroon mag niet tussentijds worden verwijderd



Deze folder is een snelle referentiegidis om je NutropinAq™ Pen klaar te maken en te gebruiken

NutropinAq™ Pen
voor gebruik met
NutropinAq™
[somatropin, recombinant DNA origin, Escherichia coli]

Dit is wat er moet gebeuren voor jouw eerste injectie
— de verpleegster of mama en papa zullen dit voor jou doen

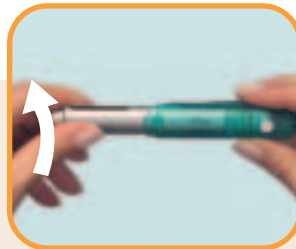

De pen klaarmaken

- 1 Verwijder de groene pendop en schroef de patroonhouder los van de pen. Verwijder zonodig de lege patroon en werp deze op gepaste wijze weg.
- 2 Druk op de witte resetknop.
- 3 Draai de zwarte doseerknop linksom terug naar zijn beginstand tot hij niet verder kan.
- 4 Draai de doseerknop vervolgens rechtsom tot de eerste klikstand (ca. 1/4 slag) is bereikt. Het doseerscherm toont twee streepjes.
- 5 Steek de patroon in de patroonhouder en schroef de patroonhouder daarna weer op de pen. (De rubberen sluiting niet aanraken.)



De dosis instellen

- 10 Druk op de witte resetknop. Het digitaal doseerscherm zal 5 seconden knipperen.
- 11 Stel de benodigde dosis in door aan de zwarte doseerknop te draaien. Als u de doseerknop te ver draait, kunt u hem terugdraaien tot de juiste dosering in het doseerscherm verschijnt.



De naaldbeschermers gebruiken

- 12 Als u de passieve naaldbeschermer (of geen naaldbeschermer) gebruikt, ga dan naar stap 13. Als u de actieve naaldbeschermer gebruikt: duw de twee zwarte vergrendelknoppen op de naaldbeschermer in de richting van de top. Schuif vervolgens de naaldbeschermer op de pen.



Injecteren

- 13 Maak de injectieplaats klaar door deze te reinigen met een alcoholdepper. Neem een huidplooi tussen duim en wijsvinger, plaats de top van de pen op de injectieplaats en druk de naald in de huid door de pen naar beneden te drukken tot de naaldbeschermer volledig is ingedrukt. Nu bent u klaar om de dosis toe te dienen. Druk op de zwarte doseerknop. Wacht 5 seconden en trek dan de naald uit de huid.

